


RiVOLUTION® MiDCAL™ Gastric Ring



RiVOLUTION EVIDENCE BASED
BARIATRIC CONCEPT

MiDCAL™ Gastric Ring

Der MiDCAL™ Gastric Ring ist die weiterentwickelte Generation und Technik des Magenringes.

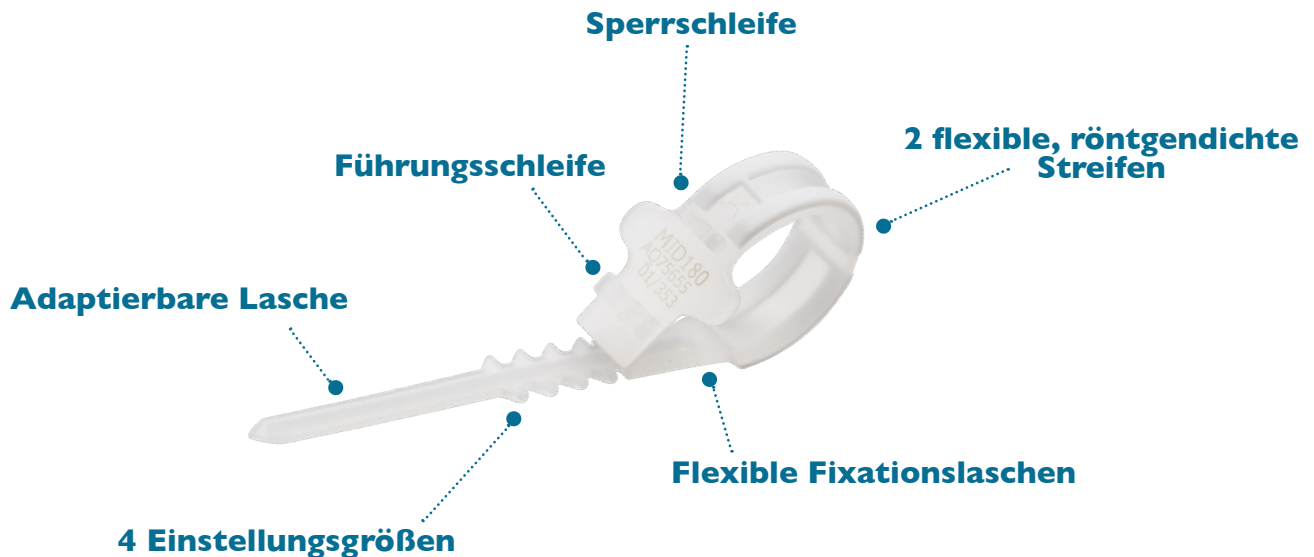


Produktvorteile & Funktionen

- Der MiDCAL™ Gastric Ring überzeugt durch seine anatomisch, optimale Passform.
- Für eine langfristige Implantation des MiDCAL™ Gastric Rings wird dieser aus medizinischem Silikon ohne Latex hergestellt.
- Der MiDCAL™ Gastric Ring ist bewusst breiter und flexibler gestaltet, um einer Migration vorzubeugen.
- Die 2 flexiblen, röntgendichten Streifen sind mit Barium Sulfat imprägniert und erlauben zu jeder Zeit die Überprüfung der perfekten Positionierung.
- Um den perfekten Umfang zu gewährleisten, sind vier Einstellungsgrößen des Umfanges vorgesehen: 65, 70, 75 und 80 mm.
- Der MiDCAL™ Gastric Ring wird nach der richtigen Platzierung an den flexiblen Fixationslaschen fixiert und soll somit einer Dislokation des Ringes vorbeugen.

INFORMATION & BESTELLUNG

MiDCAL™ Gastric Ring

Der MiDCAL™ Gastric Ring ist die weiterentwickelte Generation und Technik des Magenringes.

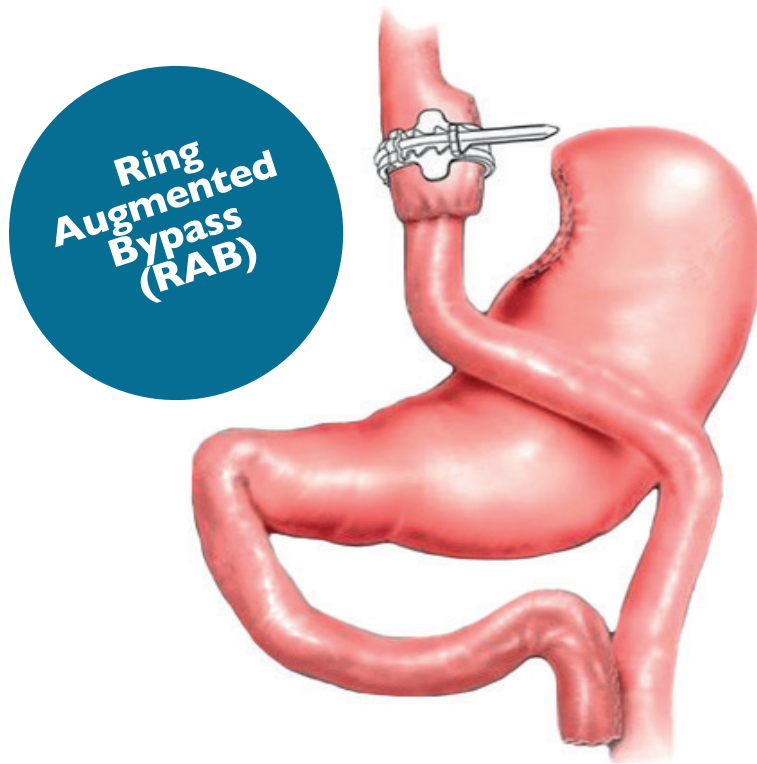

Platzierung des MiDCAL™ Gastric Ring

- Der MiDCAL™ Gastric Ring wird ca. 1 bis 2 cm oberhalb der Gastrojejunostomie platziert.
- Der MiDCAL™ Gastric Ring wird durch einen 12 mm Trokar eingebracht.
- Bei der korrekten Einstellung des MiDCAL™ Gastric Ring muss eine Magenkalibrierungs-sonde (LogiTube) mit einem Durchmesser von 36 Fr verwendet werden. Es muss gewährleistet werden, dass ein 5 mm Instrument zwischen Magenring und Magenwand problemlos Platz findet.
- Langfristig ergeben sich aus bisherigen Studien für Patienten bei einer Roux-en-Y Bypass Operation in Kombination mit dem MiDCAL™ Gastric Ring bessere Ergebnisse.

INFORMATION & BESTELLUNG



MiDCAL™ – Gastric Ring

Produktbild	Produktcode	Beschreibung	Unit	VPE
	MID180	MiDCAL™ Gastric Ring	PC	I

Key Facts: MiDCAL™ Gastric Ring

Für eine langfristige Implantation wird der MiDCAL™ Gastric Ring aus medizinischem Silikon ohne Latex hergestellt. Die Form des MiDCAL™ Gastric Ring ist so gestaltet, dass er sich an die anatomische Form der Restmagentasche optimal anpassen kann, ohne permanenten Druck auf die Magenwand (5 mm Abstand). Um einer Dislokation vorzubeugen wird MiDCAL™ Gastric Ring an den Fixationslaschen fixiert. Langfristig ergeben sich aus bisherigen Studien für Patienten bei einer Roux-en-Y Bypass Operation in Kombination mit dem MiDCAL™ Gastric Ring bessere Ergebnisse.