




Gebrauchsanweisung

Deutsch

Art. Nr. 200.62, 200.65

Fistula Brush

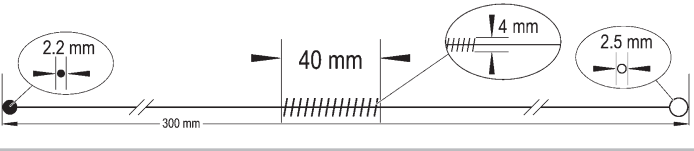

Die Fistula Brush ist ein Instrument zur Sondierung, Reinigung bzw. zum Debridement einer anorektalen Fistel.



Diese Gebrauchsanweisung ist vor der Anwendung sorgfältig zu lesen. Der Anwender sollte die Funktionsweise und Handhabung vollständig verstanden haben.

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

Die Fistula Brush besteht aus:

- Halbflexiblem Draht mit einem Bürstenabschnitt in der Mitte (Maße siehe Zeichnung oben), einer Öse am einen und einer Sondierolive am anderen Ende.

INDIKATION

Instrument für die Proktologie zur Sondierung, Reinigung bzw. Debridement einer anorektalen Fistel.

GEGENANZEIGEN

Das Instrument ist nicht zur Anwendung außerhalb der Analregion geeignet.

Das Instrument darf nicht eingesetzt werden, wenn eine mechanische Manipulation an einer anorektalen Fistel kontraindiziert ist.



Die Fistula Brush ist ein Einmalprodukt. Die verwendeten Materialien sind nicht zur Desinfektion und Sterilisation geeignet. Die Produktkomponenten sind zum Einmalgebrauch bestimmt und halten mehrmaligem Gebrauch nicht stand.

Das Aufbereiten und Wiederverwenden von Einmalprodukten kann zu Patientengefährdungen führen (unzureichende Funktion und Sterilität, Verschmutzung, Korrosion oder andere Schädigungen).

Bitte achten Sie auf Beschädigungen der Verpackung und auf das Haltbarkeitsdatum. Bei Beschädigung der Verpackung bzw. nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer kann die Sterilität des Produktes nicht gewährleistet werden.

WARNHINWEIS/VORSICHTSMASSNAHMEN

Vorsichtig vorgehen, damit der Durchmesser des Fistelganges nicht aufgeweitet wird bzw. kein übermäßiger Abtrag von vitalem Gewebe stattfindet.

- Setzen Sie das Instrument keiner direkten oder indirekten Sonnen- oder anderweitiger UV-Strahlung aus.
- Nicht in der Nähe von Chemikalien, Desinfektionsmitteln oder radioaktiver Strahlung lagern!
- Keine Gegenstände auf die Instrumente bzw. deren Verpackung stellen.
- Unsachgemäß gelagerte Instrumente werden bei Reklamationen nicht berücksichtigt.

KOMPLIKATIONEN

Verletzungen von Gewebestrukturen durch die Fistula Brush sind möglich.

Dies können insbesondere sein:

- Bei forcierterem Vorschub gegen Widerstand, Bildung eines zusätzlichen Fistelganges (Via falsa)
- Bei forcierter Reinigung, übermäßiges Abtragen von vitalem Gewebe mit damit einhergehender Erweiterung des Fistelganges
- Erzeugung von Blutungen und Hämatomen
- Abbrechen von Bürstenteilen bei unangemessener Benutzung
- Verursachung oder Verschlimmerung einer Infektion durch mechanische Gewebemanipulation



Entsprechende Vorkehrungen für den Fall auftretender Komplikationen sind vor Beginn der Anwendung zu treffen!

APPLIKATION

- Vorsichtiges Einführen der Fistula Brush in das Fistelostium
 - entweder mit der Sondierolive
 - oder, bei liegenden Drainagefäden, durch deren Verknöten an der Öse und Hineinziehen des Instrumentes mit den Fäden
- Durchzug bis sich das Bürstensegment im Fistelgang befindet
- Fistelgang vorsichtig reinigen/debridieren, indem die Bürste vor- und zurückgezogen wird
- Spülung des debridierten Fistelganges, beispielsweise mit Kochsalzlösung

Nach Gebrauch wird die Fistula Brush entsorgt.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG



0124 CE-Zeichen und Identifikationsnummer der Benannten Stelle.



Gebrauchsanweisung beachten



Chargen-Nummer



Artikel- bzw. Bestellnummer



Hersteller



Sterilisation mit Ethylenoxid



Verwendbar bis: Jahr-Monat-Tag



Nicht zur Wiederverwendung bestimmt



Nicht erneut sterilisieren



Nicht verwenden, falls Verpackung beschädigt

not made with natural rubber latex

Latexfrei



Anzahl in Packung